

Protokol bezpečnostně technické kontroly – každých 24 měsíců

Přístroj: **SpaceStation, SpaceStation se SpaceCom
SpaceCover comfort / standard**

Výrobce: B.Braun Melsungen AG

Postupujte v souladu se servisním manuálem a návodem k použití. Používejte výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřidla. Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Příslušenství a jeho doprovodná dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

Objednací číslo: 8713140	Sériové číslo. 3424	Uvedení do provozu: 10.2005	Provozovatel FN Olomouc Novorozenecká JIP D058324-000
8713147	437	10.2005	

Vizuální kontrola	Elektrická bezpečnost v návaznosti na IEC / EN 60601-1 resp. VDE 0750 a 0751	Kontrola funkce
<input checked="" type="checkbox"/> Čistota, kompletnost, nepoškozený stav, čitelnost nápisů <input checked="" type="checkbox"/> Závěsy pump <input checked="" type="checkbox"/> Lehký chod a těsnění upínacích mechanismů <input checked="" type="checkbox"/> Datové a napájecí konektory SpaceCom** <input checked="" type="checkbox"/> Síťový kabel, zástrčka, zásuvka	<input checked="" type="checkbox"/> Síťové napětí 228 V~ (AC) <input checked="" type="checkbox"/> Odpor ochranného vodiče: Přístroj vč. síťového kabelu k výstupu síťového napětí F1B: < 0,2 Ω 0,16Ω <input checked="" type="checkbox"/> Uzemňovací proud u NC vč. síťového přívodu ≤ 30μA 18 μA <input checked="" type="checkbox"/> Uzemňovací proud u SFC vč. síťového přívodu ≤ 60μA 59 μA <input checked="" type="checkbox"/> Unikající proud na skříní SpaceCom kovový límeček Ethernet RJ45 ≤ 25μA bez SL** μA Použité příslušenství <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____	Zapnout přístroj <input checked="" type="checkbox"/> Stav call <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolní signalizace SpaceCover comfort <input checked="" type="checkbox"/> Zvukový alarm SpaceCover comfort <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolní signalizace SpaceCom** <input checked="" type="checkbox"/> Kontrola funkce podle návodu k použití v závislosti na konkrétní konfiguraci Ve spojení s: <input checked="" type="checkbox"/> Perfusor®Space Sériové č. 8191 <input checked="" type="checkbox"/> Infusomat®Space Sériové číslo _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____

* = měření s a bez příslušenství ** = varianta

Výsledek zkoušky:

Byly zjištěny závady, které mohou způsobit ohrožení pacientů, personálu nebo třetích osob ANO NE

Opatření, která je třeba provést oprava _____

Zvláštnosti / dokumentace:

Kontrolu provedl:
Tománek
Předání přístroje dne: 19.11.2007
Komu:
St.s Macelová
Datum / podpis:
Termín další bezp.- technické kontroly: 11.2009

Poznámka:

B | BRAUN
 B. Braun Medical s.r.o.
 Servisní centrum
 HOTLINE
 11
 IČ: 485 86 285
 DIČ: CZ48586285
 Tel. +420-271 091 555
 Fax +420-271 091 868